

- ۱- در یک ظرف درب دار یک لیتر آب سرد بریزید. دقت کنید ظرف کاملاً تمیز باشد.
- ۲- ۲۵- گرم از پودر آکروپارس BF را به آب سرد اضافه کنید و به مدت ۳۰ ثانیه بهم بزنید سپس درب بطری را کامل ببندید.
- ۳- هر روز به مدت ۳۰ ثانیه مخلوط را بهم بزنید پس از یک هفته محلول آکروپارس BF آماده استفاده می باشد.
- ۴- محلول آکروپارس BF را با قلم مو بر روی تمام سطوح گچی بمالید. مراقب باشید محلول آکروپارس BF با دندانهای مصنوعی تماس پیدا نکند.
- ۵- محلول آکروپارس BF را در محل خنک (ترجیحاً یخچال) نگهداری نمایید.
- ۶- پودر آکروپارس BF را در ظرف کاملاً درب بسته و در محل خشک نگهداری کنید.