




آکروژل - ماده قالبگیری آلژینات زودگیر - بدون غبار
مطابق با استاندارد ISO 1563/ADA 18 specification.

روش مصرف :

- ۱- ظرف محتوی آلژینات را قبل از مصرف خوب تکان دهید.
- ۲- نسبت اختلاط: ۷ گرم پودر (معادل یک پیمانه پودر) با ۱۵ میلی لیتر آب (معادل یک نشانه از پیمانه آب)
- ۳- مدت زمان اختلاط ۳۵ ثانیه. 
- ۴- مدت زمان کارکرد: ۶۰ ثانیه. 
- ۵- مدت زمان قالبگیری در دهان: ۶۰ ثانیه. 
- ۶- کل زمان سخت شدن: ۱۵۵ ثانیه.
- ۷- دمای آب بر روی زمان های بالا تاثیر می گذارد. زمان های ارائه شده با استفاده از آب مقطر در دمای ۲۳ درجه به دست آمده است.
- ۸- پس از قالبگیری، قالب آلژینات را زیر آب شیر شسته، آب آن را با تکان دادن خشک کرده و سپس قالب گچی را تهیه کنید.
- ۹- در صورتیکه امکان تهیه قالب گچی در همان لحظه وجود ندارد، قالب آلژیناتی را درون یک کیسه قرار داده، درب کیسه را محکم ببندید.
- ۱۰- حداکثر تا ۴۸ ساعت پس از قالب آلژیناتی، قالب گچی آن را تهیه نمایید.
- ۱۱- بسته آکروژل را در محل خشک و خنک نگهداری نمایید.

توصیه های ایمنی:

- ۱- ظرف حاوی محصول را در محلی خنک و به صورت درب بسته نگهداری نمایید.
- ۲- در دسترس کودکان قرار ندهید.
- ۳- ضایعات آنرا در محل مخصوص تخلیه نمایید.

توصیه های فنی فوق بر اساس آزمایشات صورت گرفته در این شرکت استوار بوده و این شرکت بدون ارائه هر گونه ضمانت آنرا توصیه می نماید. لذا پیشنهاد می گردد قبل از استفاده برای موارد نهایی روش فوق را کنترل نموده، پس از حصول اطمینان اقدام به استفاده نمایید. بنابراین تعهد این شرکت محدود به ارزش کالای تحویلی بوسیله ما خواهد بود.