



آرپارس Re - آکريل خود پخت برای ترميم پروتز مطابق با استاندارد ISO 1567

آرپارس Re یک پلیمر خود پخت (سرما پخت) است که از متیل متاکریلات تهیه شده است. آرپارس Re دارای خصوصیات مکانیکی مناسبی می باشد.

موارد کاربرد :

آرپارس Re برای ترمیم شکستگی و یا گسترش لبه های پروتز و یا آستر دادن (Relining) قسمتهایی از پروتز و همچنین اتصال دندانهای مصنوعی به اسکلت فلزی پارسیل قابل استفاده می باشد.

روش مصرف : آرپارس Re به دو روش خمیری و قلم مو قابل استفاده می باشد.

روش خمیری :

مخلوط ۲/۵ گرم مایع و ۵ گرم پودر را مخلوط کرده و حدود ۳۰ ثانیه با اسپاتول تمیز به هم بزنید. در شرایط حرارت معمولی (۲۳ C°) حدود ۲ دقیقه فرصت کار کردن با مخلوط را داشته و پس از ۱۴ دقیقه این مخلوط کاملاً سخت خواهد شد. قبل از قرار دادن مخلوط آکريل باید سطح کست با مایع جدا کننده آرپارس BF مناسب آغشته شده و کاملاً خشک شود سپس خمیر بدست آمده در محل مورد نظر قرار دهید. جهت جلوگیری از تبخیر منومر و حباب زدن می توانید کست را درون دیگ فشار قرار داده و پس از ۱۰ دقیقه آنرا خارج کرده ، اضافات آنرا بریده و پرداخت نمایید.

روش قلم مو :

در این روش باید مایع داخل یک گوده و پودر آن داخل نمک پاش ریخته شود. ابتدا سطح کست را با محلول جدا کننده آرپارس BF آغشته و خشک کنید. سپس با قلم مو سطح کست یا محل ترمیم پروتز را با منومر آغشته کرده و روی آن پودر بپاشید تا کاملاً جذب مایع گردد. مجدداً این عمل را تکرار کنید تا کمی بیشتر از ضخامت دلخواه بدست آید. پس از ۱۰ دقیقه عمل پلیمریزاسیون کامل شده می توانید اضافات آنرا بریده و سطح آنرا پرداخت نمایید.

توجه: توصیه می گردد برای حصول نتیجه مناسب از اختلاط پودر و منومر **آرپارس Re** با سایر پودر و منومر ها خودداری فرمائید.

توصیه های ایمنی:

- ۱- بسیار آتشگیر است.
- ۲- برای چشم و دستگاه تنفسی مضر بوده و در صورت تماس با پوست ممکن است حساسیت ایجاد نماید.
- ۳- ظرف حاوی محصول را در محلی خنک و به صورت درب بسته نگهداری نمایید.
- ۴- نزدیک وسایل برقی قرار ندهید.
- ۵- در دسترس کودکان قرار ندهید.
- ۶- ضایعات آنرا در محل مخصوص تخلیه نمایید.

توصیه های فنی فوق بر اساس آزمایشات صورت گرفته در این شرکت استوار بوده و این شرکت بدون ارائه هر گونه ضمانت آنرا توصیه می نماید. لذا پیشنهاد می گردد قبل از استفاده برای موارد نهایی روش فوق را کنترل نموده، پس از حصول اطمینان اقدام به استفاده نمایید. بنابراین تعهد این شرکت محدود به ارزش کالای تحویلی بوسیله ما خواهد بود.