

آکروپارس ۲۰۰ - آکریل خود پخت برای تهیه تری اختصاصی و رکورد بیس

آکروپارس ۲۰۰ بر پایه پلی متیل متاکریلات تهیه شده و دارای قابلیت شکل پذیری فوق العاده می باشد. آکروپارس ۲۰۰ ماده ای سخت و مقاوم در برابر تغییر شکل می باشد. سهولت کاربرد و نتیجه بسیار مطلوب آن، این ماده را برای مبتدی ترین افراد و ورزیده ترین تکنسین های دندانسازی به ماده ای ایده آل تبدیل نموده است.

نحوه مصرف :

- ۱- ابتدا کست مورد نظر برای ساخت تری یا رکورد بیس باید به مایع جدا کننده آکروپارس BF آغشته شده و اندرکاتهای آن توسط موم حذف شود.
- ۲- مقدار کافی از منو مر و پودر آکروپارس ۲۰۰ تقریباً (۱۰ گرم منومر و ۲۵ گرم پودر برای هر فک) را مخلوط کرده و به مدت ۳۰ ثانیه با اسپاتول تمیز همزده شود، پس از ۲ دقیقه ، مخلوط پودر و منومر به حالت خمیری (Dough) رسیده و آماده استفاده می باشد. ابتدا این مخلوط را روی یک سطح صاف بصورت ورق ضخیم در آورده و بعد آنرا روی کست بگذارید و با فشار ملایم آنرا شکل دهید، سپس اضافات آنرا با اسپاتول قطع کنید.
- ۳- آکروپارس ۲۰۰ در حدود ۱۰ دقیقه بعد از اختلاط سخت شده و می توان آنرا از کست جدا نمود. لبه های آنرا در صورت لزوم تراشیده و پرداخت نمائید.

توجه : توصیه می گردد برای حصول نتیجه مناسب از اختلاط پودر و منومر آکروپارس ۲۰۰ با سایر پودر و منومر ها خودداری فرمائید.

توصیه های ایمنی:

- ۱- بسیار آتشگیر است.
- ۲- برای چشم و دستگاه تنفسی مضر بوده و در صورت تماس با پوست ممکن است حساسیت ایجاد نماید.
- ۳- ظرف حاوی محصول را در محلی خنک و به صورت درب بسته نگهداری نمائید.
- ۴- نزدیک وسائل برقی قرار ندهید.
- ۵- در دسترس کودکان قرار ندهید.
- ۶- ضایعات آنرا در محل مخصوص تخلیه نمائید.

توصیه های فنی فوق بر اساس آزمایشات صورت گرفته در این شرکت استوار بوده و این شرکت بدون ارائه هر گونه ضمانت آنرا توصیه می نماید. لذا پیشنهاد می گردد قبل از استفاده برای موارد نهایی روش فوق را کنترل نموده، پس از حصول اطمینان اقدام به استفاده نمائید. بنابراین تعهد این شرکت محدود به ارزش کالای تحویلی بوسیله ما خواهد بود.