

آکروسافت TC - لایه نرم موقت مطابق با استاندارد ISO 10139-1

آکروسافت TC لایه نرم موقتی است که برای بازیابی سلامت مخاطی که در اثر فشار غیر طبیعی پروتز ملتهب یا آزرده شده اند طراحی شده است. بودر آکروسافت TC از کوپلیمر اتیل متاکریلات و مایع آن از مواد نرم کننده و الکل اتیلیک تهیه شده است.

روش استفاده مستقیم:

- آماده سازی پروتز بیمار: سطح قالب گیری (سطح داخلی) پروتز را به ضخامت ۱ تا ۱/۵ میلی متر تراشیده و لبه های پروتز را به خصوص در قسمتی که زدگی مخاط ایجاد کرده کوتاه کنید. پروتز را شسته و خشک کنید.
- مقدار یک حجم از بودر (تا خط اول پیمانه بودر - حدود ۲/۲ گرم) داخل یک ظرف تمیز ریخته و مقدار ۴ حجم طبق علایم روی قطره چکان از مایع برداشته (حدود ۱/۸ گرم) با بودر مخلوط کنید مدت ۳۰ ثانیه مخلوط را با اسپاتول تمیز بهم بزینید تا یکنواخت شود.
- مخلوط را که قوام کرمی پیدا کرده پس از ۲-۱ دقیقه روی پروتز ریخته یکنواخت با اسپاتول آنرا پخش کنید. لبه های پروتز نیز توسط این مخلوط باید پوشیده شود.
- پروتز را داخل دهان برده با فشار ملایم در محل خود قرار دهید و از بیمار بخواهید دندانها را روی هم بگذارد. توجه کنید دندانها در وضعیت صحیح روی هم بسته شود. در این هنگام حرکات لازم به لبها و گونه داده شود و برای ثبت لبه های سمت زبانی فک پایین از بیمار بخواهید حرکات لازم را به زبان بدهد.
- پس از ۵-۴ دقیقه پروتز را از دهان خارج کرده و اضافت آنرا با اسپاتول گرم قطع کنید در صورتیکه قسمتهایی از پروتز توسط ضخامت کافی آکروسافت TC پوشانده نشده ناشی از فشار زیاد در این ناحیه است که باید ضخامت پروتز در این ناحیه کاسته شده و مجدداً مختصری آکروسافت TC به همین قسمت و یا ترجیحاً لایه بسیار نازکی به تمام سطح پروتز اضافه شود و داخل دهان قرار گیرد.
- بعد از رسیدن به پوشش مطلوب آن را داخل دهان قرار داده و برای ۴-۳ روز این پوشش قابل استفاده می باشد.

توجه:

- تا رسیدن مخاط آزرده به وضعیت طبیعی ترجیحاً هر ۳-۴ روز این پوشش باید تعویض شود.
- برای پاک نمودن آکروسافت TC از روی دستها و وسایل از الکل (طبی) استفاده نمائید.
- از ریلاین موقت آکروسافت TC به صورت مستمر نمی توان استفاده کرد، در این صورت بهتر است از ریلاین دائم آکروسافت SL استفاده نمود.
- از مصرف بودر و مایع آکروسافت TC با سایر مارکهای تجاری جدا خودداری فرمائید.

توصیه های ایمنی:

- بسیار آتشگیر است.
- برای چشم و دستگاه تنفسی مضر بوده و در صورت تماس با پوست ممکن است حساسیت ایجاد نماید.
- ظرف حاوی محصول را در محلی خنک و به صورت درب بسته نگهداری نمائید.
- نزدیک وسایل برقی قرار ندهید.
- در دسترس کودکان قرار ندهید.
- ضایعات آنرا در محل مخصوص تخلیه نمائید.

توصیه های فنی فوق بر اساس آزمایشات صورت گرفته در این شرکت استوار بوده و این شرکت بدون ارائه هر گونه ضمانت آنرا توصیه می نماید. لذا پیشنهاد می گردد قبل از استفاده برای موارد نهایی روش فوق را کنترل نموده، پس از حصول اطمینان اقدام به استفاده نمائید. بنابراین تعهد این شرکت محدود به ارزش کالای تحویلی بوسیله ما خواهد بود.