

سیباکرون - آکريل خود پخت مخصوص برای روکش موقت (زود گیر) مطابق با استاندارد ISO 10139-1

سیباکرون یک پلیمر سرما پخت (خود پخت) هم‌رنگ دندان برای تهیه روکش و بریج‌های موقت است. این محصول زودگیر می باشد. سیباکرون به دو روش مستقیم (Direct) و غیر مستقیم (Indirect) قابل استفاده است.

روش استفاده مستقیم:

- ۱- قبل از شروع تراش دندانها، یک قالب آلژیناتی از دندانهای بیمار تهیه کنید. از قالب گرفته شده کست گچی تهیه نمائید و روی آن در صورت نیاز دندانهای از دست رفته را به کمک موم یا دندانهای مصنوعی جایگزین کنید. در صورت وجود نواقص در شکل دندانها این نواقص را با افزودن موم و ایجاد شکل طبیعی بر روی کست رفع کنید. در صورتیکه به هیچ یک از این موارد اصلاح شکل دندانها یا جایگزینی آنها نیاز نیست می توانید قالب را لحظاتی قبل از تراش تهیه نموده و در محیط مرطوب نگهداری کنید.
- ۲- بعد از تراش دندانها از کست اصلاح شده یک قالب آلژیناتی تهیه نموده و با از قالب آلژیناتی گرفته شده از دهان بیمار استفاده کنید. مقدار کافی از سیباکرون را به نسبت وزنی ۱ به ۱/۷ (حجمی ۱ به ۲/۵) از مایع و پودر مخلوط نموده پس از ۶۰ ثانیه هم زدن سریعاً به داخل نواحی مورد نظر در قالب بریزید.
- ۳- یک دقیقه پس از ریختن سیباکرون به داخل قالب، قالب را روی دندانها قرار دهید. بعد از حداکثر ۲ دقیقه قالب را از دهان خارج کرده و اجازه دهید تا پس از ۳ دقیقه پلیمریزاسیون کامل گردد.
- ۴- اگر روکش موقت ساخته شده هنوز بطور کامل پلیمریزه نشده است می توانید آنرا داخل آب گرم قرار داده تا سریعتر سخت شود. بهتر است پیش از سخت شدن کامل روکش موقت آنرا روی دندانهای تراش خورده قرار دهید تا تغییر شکل احتمالی آن مانع نشستن آن روی دندان نگردد.
- ۵- اضافات روکش موقت را پس از پلیمریزاسیون کامل آن حذف کرده و آنرا پرداخت نمائید، سپس روی دندانها گذاشته و سطح جونده آنرا با دندانهای مقابل تنظیم کنید.
- ۶- با استفاده از سیمان موقت آنرا روی دندانهای تراش خورده ثابت کنید.

روش استفاده غیر مستقیم:

- ۱- همانند مرحله اول روش مستقیم، یک کست از دندانهای تراش نخورده بیمار تهیه کرده و اصلاحات لازم را روی آن انجام دهید.
- ۲- از کست اصلاح شده قالبی تهیه کنید؛ بعد از آن دندانهای مورد نظر را روی کست بصورت کم عمق تراش دهید.
- ۳- مخلوط با نسبتهای ارائه شده در روش مستقیم سیباکرون را داخل یک گوده ۶۰ ثانیه بهم بزینید و سریعاً به داخل محل دندانهای مورد نظر در قالب بریزید بهتر است کست را در این هنگام چرب کرده ۱ دقیقه بعد از ریختن مخلوط سیباکرون به داخل قالب، قالب را روی کست تراش خورده برگردانید به این ترتیب بریج یا روکش موقت کست ساخته می شود. بعد از پلیمریزاسیون کامل، همانند مراحل ۵ و ۶ روش مستقیم عمل نمائید.

توجه: از اختلاط سیباکرون با سایر مواد مشابه اکیدا خودداری نمائید.

سیباکرون با تمامی کرونهای پلاستیکی سازگاری دارد.

توصیه های ایمنی:

- ۱- بسیار آتشگیر است.
- ۲- برای چشم و دستگاه تنفسی مضر بوده و در صورت تماس با پوست ممکن است حساسیت ایجاد نماید.
- ۳- ظرف حاوی محصول را در محلی خنک و به صورت درب بسته نگهداری نمائید.
- ۴- نزدیک وسائل برقی قرار ندهید.
- ۵- در دسترس کودکان قرار ندهید.
- ۶- ضایعات آنرا در محل مخصوص تخلیه نمائید.

توصیه های فنی فوق بر اساس آزمایشات صورت گرفته در این شرکت استوار بوده و این شرکت بدون ارائه هر گونه ضمانت آنرا توصیه می نماید. لذا پیشنهاد می گردد قبل از استفاده برای موارد نهایی روش فوق را کنترل نموده، پس از حصول اطمینان اقدام به استفاده نمائید. بنابراین تعهد این شرکت محدود به ارزش کالای تحویلی بوسیله ما خواهد بود.